


Mode d'emploi de la pince EXTRIMPLANT®

Set extrimplant®

Réf. 01.381

Sécurisez le retrait de l'implant en limitant l'incision et le temps d'exécution grâce à la conception d'une nouvelle pince pour saisir et immobiliser l'implant

La pince EXTRIMPLANT®

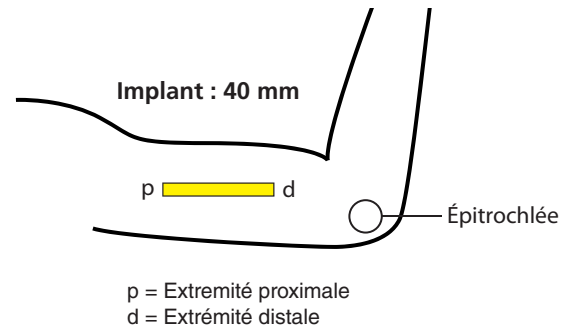


Implant à la face interne du bras


Utilisation de la pince extrimplant® pour le retrait sécurisé des implants contraceptifs :

1. Repérer l'implant et laisser une trace sur la peau avec un marqueur. Désinfecter soigneusement la région. (NB- la Bétadine n'efface pas les marques).
2. Anesthésie locale : Injecter 0.5 à 1 ml de Lidocaïne à 1% (avec ou sans adrénaline) sous l'extrémité distale au point d pour la remonter mais aussi latéralement sur une hauteur de 1 cm.
3. Saisir l'implant à 0.5 cm du point d en introduisant, en premier, sous cette extrémité, la branche droite de la pince. La graduation sert à repérer la profondeur de pénétration de la pince.
4. Rabattre la branche courbe de la pince vers l'extrémité proximale de l'implant de manière à pouvoir soulever l'extrémité distale avec la branche droite. Fermer la pince pour immobiliser l'implant. Il se forme alors un bombement de la peau au point d.
5. Inciser la peau sur 2 à 4 mm au dessus de ce bombement. L'implant apparaît facilement.
6. Extraire l'implant à l'aide de la pince courbe de Halstead. Il est souvent nécessaire d'avoir à le libérer d'une gaine fibreuse qui le retient.
7. Mettre en place une suture cutanée adhésive à retirer au bout de 5 à 6 jours. Laisser un bandage compressif en place pendant 24 à 48 heures.


Anesthésie

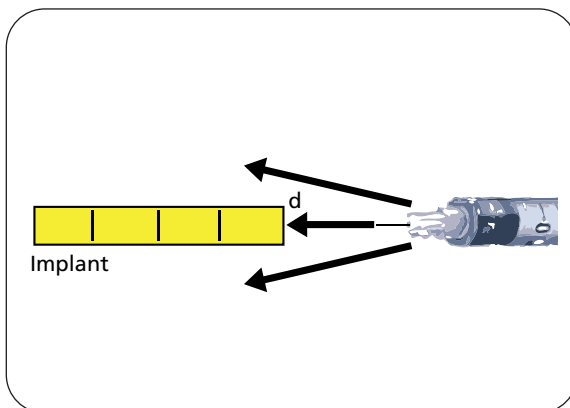

Préhension

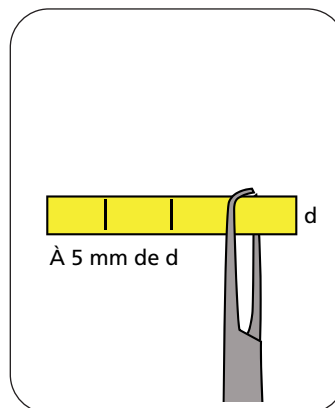

Incision

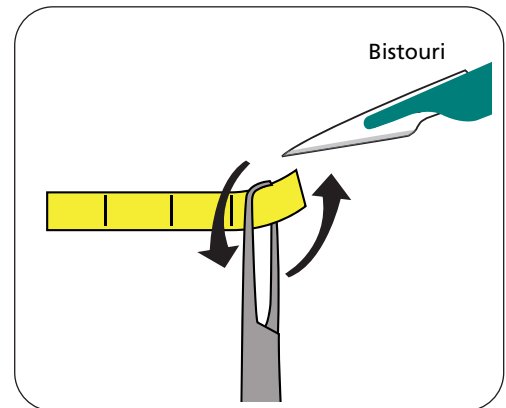

Concepteur de la pince EXTRIMPLANT® : Dr Henri LEVY (Paris)